




zsensor

## Installationsguide

PU sensor kit innehåller ett instrument, en sensorplatta, en kudde, en laddplatta med hållare och nätadapter, en snabbstartsguide och denna installationsguide.


### Förberedelse av instrumentet

1. Dra ut plastremsan ur instrumentet för att koppla in batteriet.
2. Skruva in kuddens slang i vänster uttag **A** på baksidan av instrumentet.
3. Koppla sensorplattans sladd till höger uttag **B**.

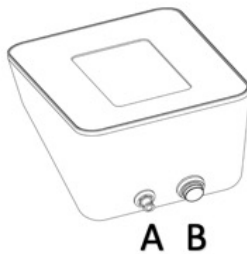


### Laddning

1. Koppla in laddplattan **A** i ett eluttag och sätt den i hållaren **B** som underlättar korrekt placering.
2. Placera instrumentet på laddplattan. När laddning startar byter laddplattans lampa **C** färg från röd till blå och instrumentet avger ett kort pip.

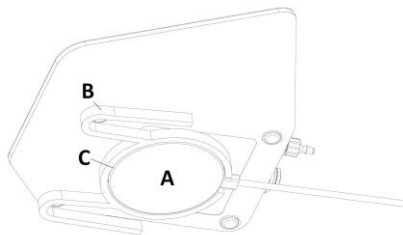



## Första uppstart

### Användaravtal


Vid första start av PU sensor visas ett användaravtal. Läs igenom hela avtalet genom att scrollera på skärmen. Acceptera genom att trycka **Acceptera** .



### Inställning av datum och tid

1. Tryck på **Info**  och sedan **Admin** .
2. Ange lösenord, som är de fyra sista siffrorna i serienumret, och tryck **Enter**. Serienumret hittas på botten av instrumentet.
3. Ställ in datum och tid och spara genom att trycka **Spara**.

### WiFi uppkoppling

1. Från Admin-sidan tryck på **Nätverksinställningar** för att koppla upp instrumentet mot ett trådlöst nätverk (WiFi).
2. Tryck på **Lägg till** för att se tillgängliga nätverk.
3. Markera det nätverk du vill ansluta till, skriv in nätverkets lösenord och tryck **Spara**.
4. Tryck **Stäng** och sedan **Tillbaka**  för att komma tillbaka till Admin-sidan.



## Val av språk

1. Från Admin-sidan tryck [Språkinställningar](#). Hitta önskat språk i listan och tryck [Välj](#) till höger om språket.
2. Se till att rätt språk är valt och tryck på [Starta om](#).  
Instrumentet kommer att startas om med det valda språket.

Mer information: [pusensor.se/anvandarsidor](https://pusensor.se/anvandarsidor)

